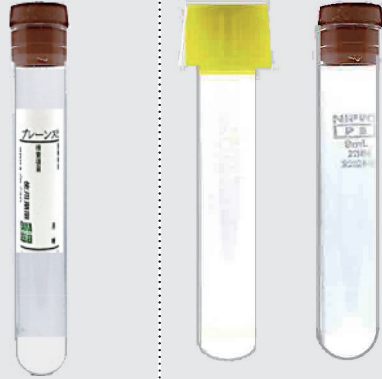


資料

検体採取容器一覧				
容器No.	1	2	3	4
名 称	真空採血管		グ ル コ ー ス(血糖) グ リ コ ヘ ム グ ロ ビ ン	凝 固
形 状				
採 取 量	9mL用 5mL用 8.5mL用		血液 1 mL	血液 2 mL
検 査 項 目	凝固血液または 血清で実施する検査 間接クームス 不規則抗体		グ ル コ ー ス(血糖) HbA1c(ヘモグロビンA1c) ヘモグロビンF	末梢血液一般 網赤血球数 末梢血液像 (自動機械法)
内 容 物	分離剤		EDTA-2Na+フッ化Na	EDTA-2K
有 効 期 限 (製 造 後)	容器または外袋表示		容器または外袋表示	容器または外袋表示
	容器または外袋表示			PT,APTT, TAT,凝固因子定量, PAI-I,AT,Dダイマー, プロテインC, プロテインS,FDP 他 製造後 1年 アルミ包装開封後 1ヵ月

容器No.	1	6	7	8
名 称	全血 血清分離用	尿 一 般	EDTA-2Na	ヘパリン
形 状				
採 取 量	1～10mL	尿 1～10mL	血液2～5mL	血液2～5mL
検 査 項 目	血清で実施する検査	尿沈渣(10mL) 尿一般検査 尿化学検査 他	BNP,アンモニア,ACTH(2mL) ACTH(2mL),アミニ酸分画(3mL),HLA, カテコールアミン分画,CMV-DNA,CMV-PP65, ADH,レニン活性・濃度,アルドステロン, セロニン等(5mL)	血中鉛(3mL) 染色体検査(5mL) DLST,一部の薬剤 他
内 容 物	分離剤		EDTA-2Na	ヘパリンNa
有 効 期 限 (製 造 後)			容器または外袋表示	容器または外袋表示

◆検体の採取法及び採取後の保存は本文をご参照下さい。

資料

検体採取容器一覧


容器No.	9	10	12	13	14
名 称	EDTA-アプロチニン	ポリボトル	乳酸・ピルビン酸	EDTA-2K	クエン酸・テオフィリン
形 状					
採 取 量	血液3mL	蓄尿10～50mL	血液1mL	血液3～5mL	血液2.7mL
検 査 項 目	ANP 他	17-KS7分画 プレグナンジオール プレグナントリオール 他	乳酸 ピルビン酸	UGT1A1, EGFR ビタミンB ₁ ・B ₂ 他	β -トロンボグロブリン 血小板第4因子
内 容 物	EDTA-2Na+アプロチニン		0.8N過塩素酸1mL 冷蔵	EDTA-2K	クエン酸Na+テオフィリン+ アデノシン+ジビルダモール 遮光冷蔵
有 効 期 限 (製 造 後)	容器または外袋表示		1年	容器または外袋表示	1年

容器No.	15	20	21	23	31
名 称	ヘリコバクター ピロリ抗原	標本ケース	金属検査用	ThinPrep	病理組織
形 状					
採 取 量			10mL容量		
検 査 項 目	糞便中ヘリコバクター ピロリ抗原	末梢血液像2枚(鏡検法) 特殊染色2枚 骨髓像3枚 細胞診固定標本	銅・亜鉛等の 尿検体用	子宮頸部細胞診・HPB-DNA(ハイ リスク)との同時検査可および HPVジェノタイプ・ 簡易ジェノタイプ・型別 固定液(メタノール 55%)	15%ホルマリン (5mL用・25mL用) 容器または外袋表示
内 容 物	リン酸バッファー				
有 効 期 限 (製 造 後)	1年6ヶ月			2年	

※未使用容器の保管..... 冷蔵：冷蔵保存, 遮光冷蔵：遮光冷蔵保存 ◆検体の採取法及び採取後の保存は本文をご参照下さい。

資料

検体採取容器一覧

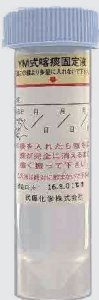容器No.	32	33	34	35	36
名 称	喀痰細胞診	喀 痰	採 便	滅菌スピッツ	シードスワブ
形 状					
検 査 項 目					(耳鼻科用)
内 容 物	エタノール+ポリエチレン グリコール+粘液融解剤				キャリーブレア培地 アミューズ培地
有 効 期 限 (製 造 後)	1年			1年	容器または外袋表示

容器No.	38	39	40	51	52
名 称	カンジダ培地	トリコモナス培地	カルチャーボトル (レズン入り)	嫌気ポーター	便ヘモグロビン
形 状					
検 査 項 目			好気用 嫌気用		
内 容 物	カンジダ培地 冷 蔵	トリコモナス培地 冷 蔵	レズン入り		保存液
有 効 期 限 (製 造 後)	容器または外袋表示	容器または外袋表示	容器または外袋表示	容器または外袋表示	1年6ヶ月

容器No.	53	54	55	56	57
名 称	便中ヘモグロビン & トランスフェリン	アルミニウム	メディウム容器 (5mL)	血中エンドトキシン β -D-グルカン	透析液中 エンドトキシン
形 状					
検 査 項 目			染色体・悪性腫瘍解析検査 細胞性免疫 (骨髓液・肺胞洗浄液等)		
内 容 物	保存液	トロンビン ヘパリン中和剤	保存液入り(5mL) 凍 結 色が薄いピンクの状態で使用してください。 (凍結時は淡黄色ですが解凍すると 薄いピンク色に戻ります。)	ノボヘパリン 15IU	安定化剤 0.1mL 冷 蔵
有 効 期 限 (製 造 後)	1年	1年		1年	1年

※未使用容器の保管..... 凍 結：凍結保存 ◆検体の採取法及び採取後の保存は本文をご参照下さい。

資料

検体採取容器一覧

容器No.	60	61	62	63	64
名 称	PCR用真空採血管 (5mL用)	感染症遺伝子増幅検査 M・ニューモニエ核酸検出 レジオネラ核酸検出	クラミジア抗原 STDマイコプラズマPCR (TMA)採取セット	単純ヘルペス特異抗原 水痘帯状ヘルペス特異抗原 (FA)採取セット	顆粒球エラスターゼ (子宮頸管粘液中)
形 状			ぬぐい液用 尿用 		
採 取 量					
検 査 項 目	HCV核酸定量	マイコプラズマ核酸検出 レジオネラ核酸検出	保存液		リン酸バッファー 抽出液は冷蔵
内 容 物	分離剤				
有 効 期 限 (製 造 後)	容器または外袋表示	1年	容器または外袋表示	1年	1年

容器No.	65	66	67	68	69
名 称	癌胎児性フィブロネクチン (頸管腔分泌液中)	核酸定量 (タックマン用)	呼気採取バッグ	結核菌特異的INF- γ 産生能 (クオンティフェロンTB)	ヘパリンナトリウム
形 状					
採 取 量		全血 10mL	呼気200~250mL	血液 6mL	血液 5mL
検 査 項 目		HBV核酸定量 (rt-PCR)	尿素呼気試験 尿素呼気試験-IR法 (ユービット)	クオンティフェロンTB	細胞性免疫
内 容 物	抽出液	分離剤		ヘパリンリチウム	ヘパリン-2Na
有 効 期 限 (製 造 後)	1年	1年		容器または外袋表示	2年

※未使用容器の保管..... 冷蔵：冷蔵保存 ◆検体の採取法及び採取後の保存は本文をご参照下さい。

資料

検体採取容器一覧

容器No.	70	72	73	75
名 称	トランスポート H・ピロリ	悪性リンパ腫解析検査	遺伝子mRNA検査	Ⅳ型コラーゲン(尿)
形 状				
採 取 量		5mL	血液 7mL	尿 5mL
検 査 項 目	H・ピロリ培養及び感受性	悪性リンパ腫解析検査(MLA) CD45ゲーティング	遺伝子mRNA検査 WT1mRNA検査など	Ⅳ型コラーゲン(尿)
内 容 物	冷蔵	ヘパリン	ACD+EDTA-2Na	1.5M Tris-HCl 0.5mL
有 効 期 限 (製 造 後)	4ヶ月	1年	1年	1年

容器No.	77	78	79	80
名 称	尿中FDP定量 (抗プラスミン剤入り)	ビタミンC	淋菌・クラミジア核酸検査(PCR) 尿・うがい液検体採取セット	ECP
形 状				
採 取 量	尿 2mL	血清 0.5mL	5mL	血清 2.5～3.0mL
検 査 項 目	尿中FDP	ビタミンC	淋菌・クラミジア核酸検査(PCR) 淋菌核酸検査(PCR) クラミジア核酸検査(PCR)	ECP
内 容 物	アプロニチン+精製ゼラチン +デヒドロ酢酸+ナトリウム	除蛋白液 (0.8N過塩素酸)0.5mL 冷蔵	グアニジン塩酸塩	血清分離剤+凝固促進フィルム
有 効 期 限 (製 造 後)	2年 (アルミパック開封後1週間以内)	1年	1年	1年

※未使用容器の保管..... 凍 結 : 凍結保存, 冷 蔵 : 冷蔵保存 ◆検体の採取法及び採取後の保存は本文をご参照下さい。

資料

検体採取容器一覧

容器No.	81	82	83	84
名 称	HIV-1核酸定量検査	尿中ミオグロビン	NK細胞活性	PAIgG
形 状				
採 取 量	8mL	10mL	血液 5mL	血液 7.5mL
検 査 項 目	HIV-1RNA定量	尿中ミオグロビン	NK細胞活性	PAIgG
内 容 物	EDTA-2K+血漿分離剤入り 4～25℃保存	保存液	冷蔵	ACD-A保存液 遮光室温
有 効 期 限 (製 造 後)	1年	2年	2年6ヶ月	1年 (アルミ包装開封後1ヶ月)

容器No.	85	86		
名 称	T-SPOT	クラミジア・淋菌同時核酸同定(PCR) 脛トリコモナス・ マイコプラズマ・ジェニタリウム		
形 状		ぬぐい液 尿 		
採 取 量	血液 9mL			
検 査 項 目	T-SPOT	クラミジア・ 淋菌同時核酸同定(PCR) 脛トリコモナス・ マイコプラズマ・ジェニタリウム		
内 容 物	ヘパリンNa	保存液		
有 効 期 限 (製 造 後)	1年6ヶ月	1年		

※未使用容器の保管.....凍 結：凍結保存, 冷蔵：冷蔵保存, 遮光室温：遮光室温保存 ◆検体の採取法及び採取後の保存は本文をご参照下さい。