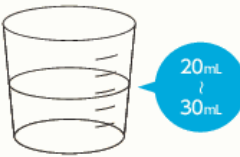
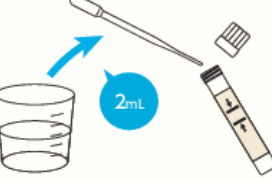
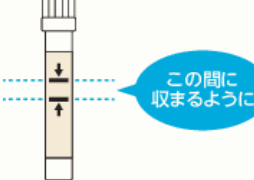
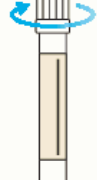


1) 初尿

【注意事項】


- 尿検体は前回の排尿後1時間経過してから採取してください。
- 女性の場合、採取前に陰唇部を拭かないようにしてください。
- 尿を多量に採取し過ぎないようにしてください。

採取方法

1  尿を採取用カップに取ります。	2  付属のスポイトで尿を2mL取りチューブへ注入してください。	3  尿はラベルの矢印の間に収まるようにしてください。	4  キャップをしっかり閉め、ラベルに氏名、採取日を記入してください。
--	---	---	--

2) めぐい液

採取方法

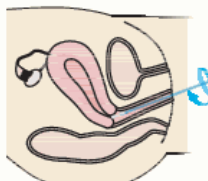1 	クリーニングスワブ（赤い印字の袋に入った白い柄のスワブ）を使用して、頸管口および周囲の粘膜から余分な粘液を十分に取り除きます。 このスワブは使用後廃棄してください。
2 	検体採取スワブ（緑の印字の袋に入った青い柄のスワブ）を子宮頸管に挿入します。 10～30秒間、スワブを時計回りにゆっくりと回転させ、検体を十分に採取します。 ゆっくりとスワブを引き抜きます。このとき、スワブが腔粘膜に触れないように注意してください。
3 	スワブを手を持ちながら、チューブのキャップを取り外します。チューブの内容物がこぼれないようにしてください。 チューブの内容物がこぼれた場合は、そのチューブを廃棄し、新しいスワブ検体輸送用チューブと交換してください。 折れ目をチューブの縁に合わせてスワブの柄を慎重に折ります。折ったスワブの柄の残りの部分は廃棄します。
4 	スワブ検体輸送用チューブのキャップをしっかりと閉めます。