

β -トロポグロブリン(β -TG) 血小板第4因子(PF4)

1. ポリスチレン採血器（19～21ゲージ針）を用い、血管壁を損傷しないようにスムーズに採血します。
（駆血帯はできるだけ使用しないでください）
2. 予め氷冷した専用容器に血液2.7mlを静かに注入し、直ちに密栓して2～3回ゆるやかに転倒混和
3. 氷浴中に入れて15～30分冷却
4. 1時間以内に冷却遠心機を用い、2000Gで30分間遠心分離
5. 液面下5mm付近の血漿をプラスチック製ピペットで各0.4ml採り、プラスチック試験管に入れて凍結保存

（2000Gにおけるローターの回転半径と回転数との関係）

半径(cm)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
回転数(rpm)	4,200	3,800	3,500	3,300	3,100	3,000	2,800	2,700	2,600	2,500	2,400

⑨ 真空採血はできません

