




《透析液中エンドトキシン・R2A-MF・RO水採取方法》

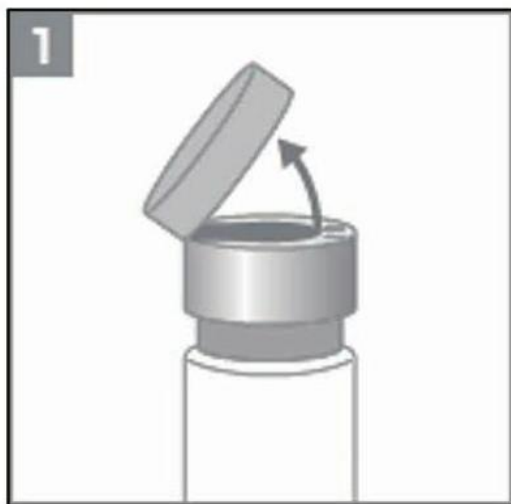

1. 容器(N o. 57)のカラーキャップを矢印の方向に引き上げ、アルミ部分を切らないように、(カラーキャップが完全に外に落ちないように) 開け、ゴム栓部分を消毒用アルコール綿で拭きます。

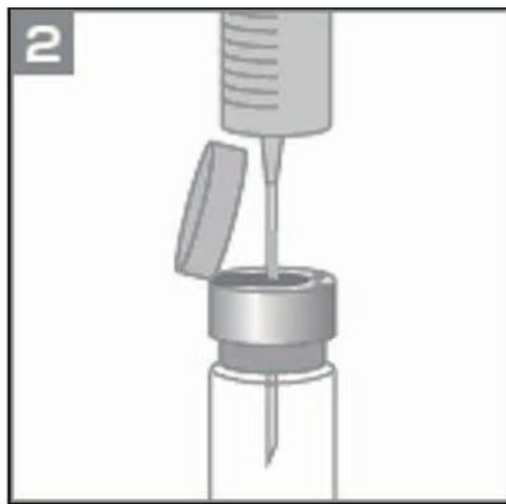

2. 無菌的に透析液を注射針付きのシリンジで採取し、容器(N o. 57)のゴム栓部に刺します。

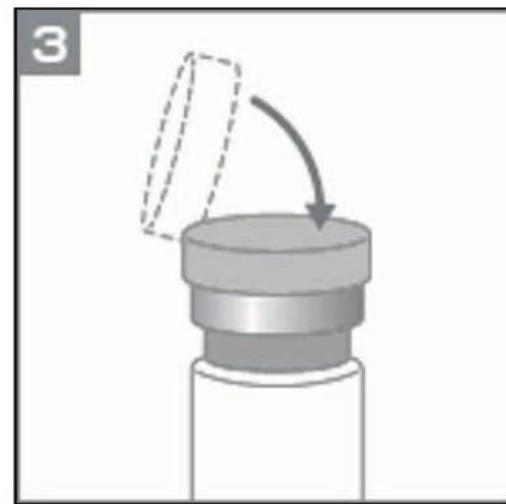

3. 注入が終わりましたら、カラーキャップを元通りに被せ、直ちに4回ほど容器を振り、安定化剤を均質に混ぜ、速やかに冷蔵保存し、提出してください。